



PONSO
DAS SITZPRINZIP



Ab jetzt
sitzt du dich
Fit

Gebrauchsanleitung
Sitzkissen PonSo

made in germany



Lieber Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses qualitativ hochwertigen Sitzkissens PonSo entschieden haben. Es sorgt für eine natürliche Druckverteilung und bietet einen hervorragenden Sitzkomfort und eine einwandfreie Qualität.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung und alle Anweisungen vollständig durch bevor Sie das Sitzkissen verwenden.

Lieferumfang: 1x Sitzkissen PonSo
1x Gebrauchsanweisung



Bitte prüfen Sie unverzüglich nach Erhalt der Ware den Inhalt auf Vollständigkeit, die Verpackung und das Produkt auf Schäden. Ist eine Beschädigung zu erkennen oder fehlt ein Bestandteil des Lieferumfangs, melden Sie sich umgehend bei uns.

Anwendung

Nehmen Sie das Sitzkissen aus der Verpackung und bewahren Sie den Karton für eventuelle Lagerungen oder Transporte auf.

Legen Sie das Sitzkissen auf den Stuhl mit einer festen und ebenen Sitzfläche und nehmen die erforderliche Sitzposition ein.



Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass die rutschhemmende Seite unten ist, sodass ein Verrutschen des Kissens vermieden wird. Die Kissenoberseite zeigt den Bezugsstoff. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Sitzkissens und auf eine aufrechte Sitzhaltung.



Zweckbestimmung


Bewegung ist Leben!

Im Alltag sitzen wir stundenlang, bei der Arbeit, beim Fernsehen, im Auto. Die Folge: Es entstehen Hohlkreuz und Rundrücken, die Bandscheiben trocknen aus und die Muskeln verkümmern. Das Becken ist fixiert und damit unbeweglich.

Die besondere Form des PonSo Sitzprinzips kombiniert mehrere wichtige Lösungsansätze, um Rückenschmerzen aktiv zu verhindern.

Zusammengefasst:

Alle Muskeln werden bewegt, unser Becken kann sich in alle Richtungen frei bewegen/rotieren und schließlich kann der Gleichgewichtssinn wieder uneingeschränkt funktionieren.

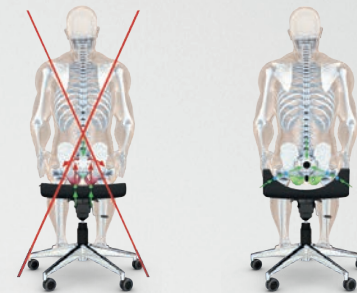




Aufbau



anatomisch geformter Polyurethanschaum
mit Höhenrücken und seitlichen Schenkeln
Erleichterung der Positionierung des Gesäßes
und der Oberschenkel


Anti-Rutsch Beschichtung
Auf der Unterseite des
Sitzkissens für perfekten Halt

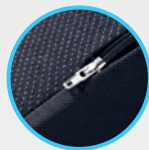


Größen

Die Kissengröße richtet sich ausschließlich nach der Fläche des Auflageuntergrundes.
Die Wirkungsweise wird nicht durch Körpergröße oder Gewicht beeinflusst.

Größen Erwachsene:

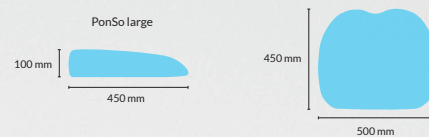

Größen Kinder:

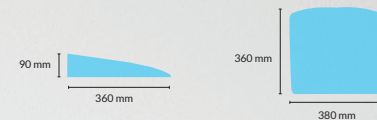

Pflegehinweise

Wie alle Materialien des täglichen Gebrauchs benötigen auch Kissenbezugsstoffe eine regelmäßige Unterhaltspflege, da sie ebenfalls der ständigen Staub- und Kontaktverschmutzung ausgesetzt sind. Allgemein sollte man die Verschmutzung nicht zu intensiv werden lassen, um die Reinigungsmaßnahmen nicht zu erschweren und das Einziehen der Verschmutzungen in den Bezugsstoff zu verhindern. Die richtige Reinigung und Pflege erhält den Gebrauchswert Ihres PonSo-Sitzkissens.

Kräftiges Reiben oder Bürsten muss auf jeden Fall vermieden werden, da dies die Bezugs-oberfläche aufraut. Haustiere mit scharfen Krallen müssen von dem PonSo-Sitzkissen ferngehalten werden.

Staub & Krümel:

Mit einer weichen Bürste (z.B. Kleiderbürste) abbürsten oder mit dem Staubsauger und einer glatten Polsterdüse ohne Borsten absaugen.

Stoffpflege:

Der Preis eines Stoffes sagt nicht zwangsläufig etwas über seine Robustheit und Langlebigkeit aus, sondern kann Ausdruck anderer Qualitätskriterien sein, wie z.B. der Exklusivität und Eleganz der verwendeten Materialien (z.B. Seide), der Raffinesse des Druck- oder Webverfahrens, des hohen ästhetischen Wertes oder der extremen Feinheit. Man verbringt eine unglaubliche Zahl von Sitzstunden unter hohen Gewichtsbelastungen, Scheuerbewegungen und anderer Einflüsse wie Licht, Wärme, Staub etc. Die Qualität der verwendeten Materialien, die Intensität der Nutzung sowie Tabakrauch, Schweiß oder sonstige Körperabsonderungen und ihr Pflegeverhalten bestimmen somit in hohem Maße, wie lange die Freude an den Sitzkissen währt.

Flecken:

Mit handelsüblichen Trockenschaum oder Reinigungsmittel entfernen. Füllkern zur Reinigung auf keinen Fall herausnehmen. **Der Bezug ist nicht waschbar!**



Toleranzen:

Fertigungstechnische Toleranzen sind in der industriellen Serienproduktion nicht zu vermeiden. Liegt die Abweichung (Toleranz) bei Farbe, Struktur und Maßen innerhalb der nationalen und internationalen Norm und im unerheblichen Bereich, liegt kein Sachmangel vor.

Wellenbildung:

Richtlinie: Je dünner das Bezugsmaterial ist, umso größer ist die Neigung zur Falten- und Muldenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und evtl. auch Leder (Sonderwunsch) sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Diese optische Veränderung hat auf Gebrauch, Funktion und Lebensdauer keinen Einfluss und stellt keinen Sachmangel dar.

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Kaufdatum des Sitzkissens. Kommt es während der Gewährleistung zu Mängeln am Produkt, die aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, werden wir das Produkt kostenlos austauschen.

Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, unsachgemäßer Gebrauch, sowie technische Änderungen und Ergänzungen ohne Zustimmung der Firma V.I.P. Aktiengesellschaft, führen zum Erlöschen der Gewährleistung und der Produkthaftung allgemein.

MADE IN GERMANY



V.I.P. Aktiengesellschaft
Ludwig-Hüttner-Straße 5-7
D - 95679 Waldershof

Tel. +49 9231 505853
Fax. +49 9231 505845
E-Mail: info@ponso.de
Web: www.ponso.de

Ab jetzt
sitzt du dich
Fit



PonSo
DAS SITZPRINZIP